

Cytologie

Borsteling - Galwegen / Papil van Vater / Pancreas uitvoergang(en) / Luchtwegen

1. Recipiënt openen.
- 2a. Onmiddellijk na afname de **borstel afknippen** (indien mogelijk) en in een klein recipiënt met een relatief beperkte hoeveelheid **CytoRich Red** (CRR) laten vallen. De borstel moet volledig ondergedompeld zijn in het fixatief.
- 2b. Indien borstel afknippen onmogelijk is: Onmiddellijk na afname **borstel uitslaan** in een recipiënt met een relatief beperkte hoeveelheid **CytoRich Red** (CRR).
Het is belangrijk om celmateriaal zo snel mogelijk na afname te fixeren. Dit maakt een optimale beoordeling van het staal mogelijk en bevordert de kwaliteit van de aanvullende onderzoeken.
3. Geen uitstrijkjes maken!
4. Recipiënt sluiten. Schudden.
5. Correct en volledig ingevuld **wit** aanvraagformulier bijvoegen.
6. Standaard staaltransport.

Dienst Pathologische Anatomie Jessa Ziekenhuis
Stadsomvaart 11, Huis 9 (3de verdieping)
3500 Hasselt
Secretariaat: tel. 011 33 83 72, fax: 011 33 83 78
Diensthof: Dr. Katrin Wouters 011 33 83 80 katrin.wouters@jessazh.be

Dr. Ruth Achten	011 33 83 81	ruth.achten@jessazh.be
Dr. Lieve Cappelle	011 33 83 82	lieve.cappelle@jessazh.be
Dr. Maria Drijkoningen	011 33 83 83	ria.drijkoningen@jessazh.be
Dr. Michel Vanbockrijck	011 33 83 85	michel.vanbockrijck@jessazh.be
Dr. Jacques Vanwing	011 33 83 84	jacques.vanwing@jessazh.be
Dr. Erika Wisanto	011 33 83 86	erika.wisanto@jessazh.be